

Skumplater



EGENSKAPER:

- Myk og skånsom mot huden.
- Avlaster trykk på trykkutsatte steder på kroppen, og reduserer smertene.
- Forebygger videreutvikling av tykk hud og sår.
- Kan klippes til.
- Hypoallergen klebemasse.

BRUK:

- Rens området som skal avlastes og la det tørke. Dette for å sikre at plasteret sitter godt.
- Klipp til ønsket størrelse på platen.
- Fjern dekkpapiret.
- Sett platen sentralt over området som skal trykkavlastes.
- Gni godt for å sikre at platen sitter godt.
- Platen må skiftes regelmessig. Må ikke sitte på lenger enn en uke.

SALGSARGUMENTER:

- Myk og skånsom mot huden.
- Til trykkutsatte steder over hele kroppen.
- Fleksibel i bruk. Klippes til ønsket størrelse.
- Friksjonsdempende og forebygger videreutvikling av tykk hud og sår.
- Sitter godt.
- Enkelt og brukervennlig. 3 plater i samme eske.
- Apotekvennlig emballasje.

INNEHOLDER

3 stk. skumplater 6cm x 10 cm 1,5 mm tykk.

Norgesplaster®